

INSTRUCCIONES PARA DESCONGELAR SEMEN DE TORO

GENANDES

1. Identificar el código del toro con el se va a inseminar y ubicar la canastilla en la que se encuentra.
2. Preparar todo el equipo de inseminación: pistola, catéteres, guantes, etc. y tenerlo listo antes de descongelar el semen.
3. Preparar agua tibia a 36° C en un termo descongelador.
4. Sacar la pajilla del tanque y descongelarla por 30 segundos.
5. Mientras el semen se descongela, calentar manualmente la pistola.
6. Cargar la pistola con la pajilla, colocar el catéter y cubrirla con papel higiénico para protegerla de los cambios bruscos de temperatura y de la luz.
7. Inseminar la vaca en cuanto se ha cargado la pistola, dentro de los primeros 5 minutos de haber descongelado el semen.
8. Anotar en los registros la fecha de inseminación y el código del toro utilizado.
9. Medir el nitrógeno del tanque frecuentemente y solicitar su recarga antes de que el nivel sea menor a 10 cms.
10. Si se utiliza termómetro descongelador de tipo reloj, verificar frecuentemente que le termómetro este marcado la temperatura correcta y calibrarlo si fuera necesario.

IMPORTANTE!!!

- Descongelar siempre una sola pajilla a la vez.
- En caso de que se vayan a inseminar varias vacas, verificar la temperatura del agua frecuentemente.
- Mantener todo el equipo de inseminación limpio y bien almacenado.