

C.M.T.**Reactivo para el diagnóstico de la mastitis subclínica****COMPOSICIÓN:**

Dodecil sodio sulfato	2 %
Cristal violeta	0,0033 %
Vehículo acuoso c.s.p.	1.000 ml

INDICACIONES: Reactivo (California Mastitis Test) para la prueba de campo utilizada en la detección precoz de la mastitis subclínica de la vaca.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Lave la ubre de la vaca y séquela con toalla de papel. Descarte el primer chorro de leche.

Deposite en cada pocillo de la paleta 2 a 3 ml de leche de cada cuarto.

Agregue igual cantidad de reactivo **C.M.T.**

Agite la paleta en forma circular hasta mezclar muy bien la leche y el **C.M.T.**

Haga la lectura según las indicaciones de la etiqueta del producto. Se recomienda someter a tratamiento los animales cuyos resultados sean de 2 y 3 cruces. En caso de duda utilice los servicios del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Envase x 1 litro.

REGISTRO: 11B-4276-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.